

PROCEDURY STERYLIZACJI

Sterylizacja kleszczy

Uwaga: niniejszy produkt NIE JEST wysterylizowany. Jeśli produkt ma być stosowany w jamie ustnej, przed użyciem musi zostać wysterylizowany za pomocą zatwierdzonej metody. Narzędzia Ortho Technology zostały przebadane i stwierdzono, że są odporne na korozję w przypadku poddawania ich poniższym metodom, przy ścisłym przestrzeganiu wymienionych procedur.

Autoklaw:

1. Narzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Narzędzia należy umieszczać w tacce autoklawu na płasko, z otwartymi szczękami. W sterylizatorze należy stosować wodę destylowaną.
4. Cykl sterylizacji w autoklawie powinien wynosić dwadzieścia minut (132°C i 25 psi). Po dostatecznym schłodzeniu sprzętu wyjąć narzędzie. Należy dokładnie wysuszyć je ręcznikiem upewniając się, że zawias nie jest wilgotny. Narzędzia (ich zawiasy) należy smarować stosując silikonowy środek smarujący w spreju.

Uwaga: narzędzia pozostawione w autoklawie mogą wykazywać oznaki korozji w przypadku nie wyjęcia po zakończeniu cyklu.

Chemiklaw:

1. Narzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Narzędzie należy położyć na płasko w tacce chemiklawu. Między narzędziami umieścić warstwę papierowych ręczników. Szczęki narzędzi muszą pozostać otwarte. W sterylizatorze należy stosować wodę destylowaną.
4. Cykl sterylizacji w chemiklawie powinien wynosić dwadzieścia minut (121°C i 25 psi.) Po ukończeniu cyklu należy przeprowadzić rozszczelnienie i wyrównać ciśnienie sprzętu. Narzędziom należy umożliwić dostateczne ochłodzenie. Narzędzia (zawiasy) należy smarować stosując silikonowy środek smarujący w spreju.

Uwaga: Narzędzia pozostawione w autoklawie mogą wykazywać oznaki korozji w przypadku nie wyjęcia po zakończeniu cyklu.

Suche gorące powietrze:

1. Narzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.

3. Narzędzia należy umieścić w uchwytach do sterylizacji. Rozpocząć 20-minutowy cykl. Po zakończeniu cyklu należy wyjąć narzędzia. Narzędzia (zawiasy) należy smarować stosując silikonowy środek smarujący w spreju.

Sterylizator oparty o szybką wymianę ciepła

1. Narzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Złącze należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Umieścić narzędzia w komorze sterylizacyjnej. Rozpocząć 6-minutowy cykl. Po zakończeniu cyklu należy wyjąć narzędzia i pozostawić do schłodzenia. Narzędzia (zawiasy) należy smarować stosując silikonowy środek smarujący w spreju.

Sterylizacja na zimno: 2% aldehyd glutarowy

1. Narzędzie musi zostać dokładnie oczyszczone! Należy czyścić je przez 5 minut w uniwersalnej myjce ultradźwiękowej.
2. Zawias należy dokładnie wysuszyć za pomocą sprężonego powietrza lub ręcznika, do sucha, upewniając się, że nie zawiera wilgoci.
3. Zanurzyć narzędzie w płynie sterylizacyjnym na co najmniej jedną (1) godzinę.
4. Wyjąć narzędzia z roztworu. Przemyc sterylną wodą. Następnie dokładnie wysuszyć ręcznikiem upewniając się, że zawias nie jest wilgotny.

Zwroty w ramach gwarancji

Narzędzia które nie zostały użyte nieprawidłowo lub nie były nadmiernie eksploatowane i które są wadliwe zgodnie z warunkami gwarancji mogą zostać zwrócone Ortho Technology w celu naprawy lub wymiany, w zależności od wyłącznej decyzji Ortho Technology. Do produktu należy dołączyć formularz reklamacyjny który można uzyskać kontaktując się z dystrybutorem OT w Polsce – firmą ORTO-FAN® (tel. 22 818 53 87). Ze względu na ewentualną ekspozycję na patogeny przenieszone przez krew, narzędzia muszą zostać odpowiednio przygotowane do zwrotu – ORTO-FAN® nie może przyjmować narzędzi do oceny bez potwierdzenia sterylizacji. W razie gdy dowód sterylizacji nie jest oczywisty, ORTO-FAN® zastrzega prawo do zwrócenia narzędzi klientowi. Reklamowane narzędzie wraz z dokładnie uzupełnionym formularzem należy dostarczyć do siedziby ORTO-FAN: ul. Jagiellońska 66, 03-468 Warszawa.