

TRULOCK™

ŚWIATŁOUTWARDZALNY KLEJ DO PIERŚCIENI



OPIS:

Światłoutwardzalny **klej do pierścieni Trulock™** to materiał wiążący do pierścieni. Jego skład jest oparty o żywicę z zawartością uwalnianego fluoru. Klej nie wymaga mieszania, co pozwala na wykorzystywanie jego optymalnej ilości. Produkt zapewnia stałą wydajność klejenia oraz pozwala oszczędzać czas w trakcie zabiegów. Charakterystyczny niebieski kolor światłoutwardzalnego **kleju do pierścieni Trulock™** umożliwiła łatwe obserwowanie kleju podczas osadzania, czyniąc oczyszczanie prostym. Podczas stosowania w połączeniu z wysocące wydajnym światłem do utwardzania czas aktywacji wynosi 20 sekund.

WSKAZANIA DO UŻYCIA:

Światłoutwardzalny **klej do pierścieni Trulock™** to klej stomatologiczny opracowany do wiązania wyrobów ortodontycznych do zębów.

PRZECIWSKAZANIA:

Światłoutwardzalny **klej do pierścieni Trulock™** jest niewskazany u pacjentów, u których w przeszłości występowały ciężkie reakcje alergiczne na żywice metakrylanowe.

UWAGA:

Nie stosować w obecności materiałów na bazie eugenolu, ponieważ może nie nastąpić pełne stężenie.

Ogólne środki ostrożności:

1. Prawo federalne USA ogranicza sprzedaż niniejszego wyrobu do sprzedaży przez lub na zlecenie stomatologa.
2. Należy zapoznać się z instrukcjami oraz Kartą Charakterystyki Substancji przed rozpoczęciem leczenia. Należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami.

Reakcje niepożądane:

Alergie lub wcześniejsze choroby skóry, oczu i układu oddechowego mogą ulec zaostrzeniu przez ekspozycję na niniejszy produkt.

INSTRUKCJE UŻYCIA:

Dokładnie oczyścić zęby, które mają podlegać cementowaniu korzystając z profilaktycznej pasty. Nie wolno stosować pasty profilaktycznej zawierającej olej lub fluor, ponieważ może ona hamować cementowanie.

Należy dokładnie spłukać zęby dużą ilością wody; wysuszyć sprężonym powietrzem, suchym i bez substancji olejowych. Odpowiednio kontrolować poziom wilgotności, odizolować dany obszar i zapobiec naniesieniu wilgoci podczas tężenia. Dla prawidłowego dopasowania należy przymierzyć każdy pierścień, który ma być cementowany u pacjenta. Po sprawdzeniu dopasowania należy zdjąć pierścienie i wyczyścić.

Przytrzymać pierścień między kciukiem i palcem wskazującym. Nałożyć kroplę Światłoutwardzalnego **kleju do pierścieni Trulock™** na wewnętrzną stronę pierścienia. Pokryć całą wewnętrzną część pierścienia rozprowadzając pastę małą szpatułką lub innym odpowiednim narzędziem.

Osadzić pierścień na zębie, usuwając nadmiar Światłoutwardzalnego **kleju do pierścieni Trulock** za pomocą skalera.

Za pomocą jednostki do utwardzania światłem widzialnym o minimalnej mocy 600 mW/cm² utwardzać materiał przez co najmniej 20 sekund. Końcówkę ze światłem należy umieścić w pobliżu powierzchni zgryzu zęba, na którym jest zakładany pierścień.

Wymienić zatyczkę na strzykawce ze Światłoutwardzalnym **Klejem do Pierścieni Trulock™**.

PRZECHOWYWANIE:

Zaleca się przechowywanie w warunkach temperatury od 2°C/36°F do 27°C/80°F, ogrzewając do temperatury pokojowej (22°C/72°F) przed zastosowaniem.

Nie zamrażać. Data ważności znajduje się na opakowaniu zewnętrznym.

Nie wystawiać na działanie podwyższonej temperatury lub intensywnego światła.

Przechowywać pojemnik zamknięty jeśli nie jest stosowany.



OGRANICZENIE TEMPERATURY

przechowywać w temp. 2°C-27°C (36°F-80°F)



RMO, Inc

650 West Colfax Avenue,
Denver, CO 80204 USA
www.rmortho.com



RMO Europe
300 Rue Geiler de Kaysersberg
67400 Illkirch, Francja