

TRULOCK™

SYSTEM WIĄZANIA (WYTRAWIACZ W ŻELU/W PŁYNIE)



OPIS:

Wytrawiacz Trulock™ zawiera 37% kwasu fosforowego do użytku zarówno na zębinie, jak i na szkliwie. Lepkość żelu **Trulock™ Etchant Gel** zapewnia idealną kontrolę, zapobiegając przepływowi substancji na odsłonięte powierzchnie zębów. Wytrawiacz można bez problemu zmyć – nie pozostawia osadu. **Wytrawiacz Trulock™** jest dostępny w kolorach niebieskim i zielonym, umożliwiając łatwe odróżnienie od struktury zęba.

WSKAZANIA DO UŻYCIA:

Wytrawianie szkliwa i zębiny do zabiegów z substancjami klejącymi.

PRZECIWWSKAZANIA:

Wytrawiacz Trulock™ jest przeciwwskazany do stosowania na tkankach miękkich, w tym śluzówce jamy ustnej, skórze, oczach i miazdze zęba.

OSTRZEŻENIA:

Wytrawiacz Trulock™ zawiera kwas fosforowy, który może wywoływać poparzenia tkanek miękkich. Unikać kontaktu z tkankami miękkimi, oczami i skórą. W razie wystąpienia przypadkowego kontaktu z tkankami miękkimi, oczami lub skórą należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zawsze dokładnie dokręcać oryginalną zatyczkę po każdorazowym użyciu.

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Prawo federalne USA ogranicza sprzedaż niniejszego wyrobu do sprzedaży przez lub na zlecenie stomatologa.
2. Należy zapoznać się z instrukcjami oraz Kartą Charakterystyki Substancji przed rozpoczęciem leczenia. Należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami.

REAKCJE NIEPOŻĄDANE:

Alergie lub wcześniejsze choroby skóry, oczu i układu oddechowego mogą ulec zaostrzeniu przez ekspozycje na niniejszy produkt.


INSTRUKCJE UŻYCIA:


1. Przygotować ząb.
2. Odizolować i dokładnie wysuszyć sprężonym powietrzem wolnym od wody i oleju.
3. Zdjąć zatyczkę i założyć końcówkę aplikatora* na strzykawkę **wytrawiacza Trulock™**. Nałożyć **wytrawiacz Trulock™** na przygotowane szkliwo na 15 sekund lub w przypadku aplikacji na zębinie – wytrawiać przez 10 sekund. Delikatne wstrząsanie wytrawiacza podczas jego aplikacji może potęgować jego działanie.
4. Dokładnie zmyć wodą.
5. W przypadku stosowania kleju wiążącego kierować się instrukcjami producenta, aby stwierdzić czy powierzchnia zęba ma pozostać wilgotna lub zostać dokładnie wysuszona.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać materiał w warunkach temperatury od 2°C/36°F do 27°C/80°F, ogrzewając do temperatury pokojowej (22°C/72°F) przed zastosowaniem. Nie zamrażać. Data ważności znajduje się na opakowaniu zewnętrznym.

* Końcówki aplikatora są jednorazowe i przeznaczone do użycia w przypadku jednego pacjenta.

 RMO, Inc
650 West Colfax Avenue,
Denver, CO 80204 USA
www.rmortho.com

 EC REP
RMO Europe
300 Rue Geiler de Kaysersberg
67400 Illkirch, Francja